

RMP MED – Steffen Roßberg | Bismarkstraße 56 | 01257 Dresden

**Schnelltest auf Restproteine, 50 Stäbchen mit 2 Tests**  
**Protein Schnelltest zur Qualitätssicherung der Reinigung chirurgischer Instrumente,**  
**kostengünstig durchzuführen, zur sofortigen Bestimmung und visuellen Auswertung**  
**etwaiger Proteinrückstände**

Ziel aller Reinigungsprozesse ist es, Verschmutzungen und einen großen Teil von Mikroorganismen von Oberflächen zu entfernen. Ein Schnelltest auf Restproteine ermöglicht es, den Erfolg solcher Reinigungsprozesse zu kontrollieren. Er versetzt den Anwender in die Lage, die Proteinbelastung auf Oberflächen aller Art zu testen.

Dieser Schnelltest basiert auf dem Nachweis von Albuminen, welche in einem weiten Spektrum von Verschmutzungen anzutreffen sind.

Eine einfache Handhabung!

Ein Proteintest-Stäbchen vom 10er-Streifen abtrennen. Jedes Stäbchen hat zwei Indikatoren, die jeweils für einen Reinigungstest verwendet werden können.

Mit dem unverpackten Indikatorstäbchen die zu prüfende Oberfläche fest abwischen. Nach erfolgter Beurteilung kann das andere Ende des gleichen Stäbchens für einen zweiten Test genutzt werden.


Sofortige Auswertung!

Die Proteinbelastung der geprüften Oberfläche kann innerhalb von 30 Sekunden bestimmt werden. Weist die überstrichene Oberfläche eine Proteinbelastung von mehr als 20 µg auf, so schlägt der Proteintest-Indikator von gelb nach hellgrün um. Liegt die Proteinbelastung oberhalb von 150 µg, erfolgt der Farbumschlag nach dunkelgrün. Damit ist der Proteintest-Indikator weitaus sensibler und objektiver als die Prüfung mit dem menschlichen Auge.

Durch die schnelle Reaktion des Proteintest-Indikators können nötigenfalls umgehend Korrekturmaßnahmen ergriffen werden. Für Unsicherheiten bleibt so kein Raum.

Ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis!

Diese Proteintest-Stäbchen werden in einer Verpackungseinheit von 50 Stück geliefert. Mit jedem Stäbchen können zwei Prüfungen durchgeführt werden; eine Verpackungseinheit ermöglicht somit 100 Proteinrückstandsbestimmungen.

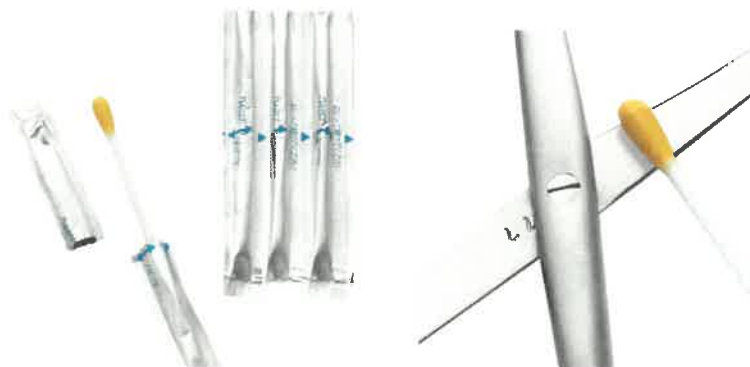

RMP MED – Steffen Roßberg  
 Medizinische Produkte e. K.  
 Bismarkstraße 56  
 01257 Dresden

Registergericht Dresden  
 HRA 6587  
 Ust.-ID-Nr. DE253156735  
 EORI-Nr. DE785413139402371

Tel +49 (0)351 65219522  
 Fax +49 (0)351 65219526  
 info@rmp-med.shop  
 www.rmp-med.shop

Ostsächsische Sparkasse Dresden  
 DE81 8505 0300 0221 0994 76  
 OSDDDE81XXX

Volksbank Dresden-Bautzen eG  
 DE18 8509 0000 3576 2510 08  
 GENODEF1DRS